

PASESAⅢデータ管理ソフト インストールマニュアル



目次

1.はじめに.....	1
ご挨拶.....	1
本書の取扱について	1
商標.....	1
インストールするときのご注意	2
インストール推奨 PC スペック.....	2
2.ソフトウェアのインストール(Windows 10 64bit).....	3
3.ソフトウェアのアンインストール(Windows 10 64bit).....	6
4.ソフトウェアのインストール(Windows 10 32bit).....	8
5.ソフトウェアのアンインストール(Windows 10 32bit).....	11
6.データの完全な削除に関して	13
7.問い合わせに関して	15

1.はじめに

ご挨拶

このたびは志成データムの PASESAⅢをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。PASESAⅢは血圧計から取得した測定情報をわかりやすく管理・印刷・表示することができます。動脈血圧の非観血的測定によって得られた最高および最低血圧、脈拍、AVI・API、血管年齢を分かりやすく管理します。

本書は血圧計 AVE-2000Plus との接続を想定し記述しています。
本書は主に PASESAⅢデータ管理ソフトのインストールについて記述したものです。
本書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
本書は利用者がいつでも見られるように大切に保管してください。

本書の取扱について

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは著作権法により禁止されています。
本書の内容は予告なしに変更する場合があります。
本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点がありましたら弊社までご連絡ください。
志成データムの許可なく複製・改変などを行うことはできません。

商標

本書に商品名が記載されている場合、その商品名は当該会社の商標または登録商標となっている場合があります。

インストールするときのご注意

- ・Windows Update を行い最新の Windows 10 及び .Net framework に更新頂いた上でインストールを進めてください。
- ・Windows 10 の最新バージョンに対応した PASESAⅢデータ管理ソフトの配布がないか「<http://www.shisei-d.co.jp/>」を確認し最新バージョンの配布がある場合はダウンロードしご利用ください。
- ・インストールは、必ず「管理者権限(Administrators)」に所属するユーザ名でログオンしてください。
- ・通常 64bit OS 用のみインストール頂ければ 32bit はインストールする必要がありません。32bit OS ご利用のお客様は 32bit インストーラをお試しください。

インストール推奨 PC スペック

OS	Windows10 20H2 64 ビット
表示解像度	フル HD(1920 x 1080)
CPU	Intel® Core™ i5 2Ghz 以上
メモリー	4GB 以上
SSD ドライブの 空き容量	128GB 以上
.Net framework バージョン	4.7.2 以上

2.ソフトウェアのインストール(Windows 10 64bit)


- ①起動しているアプリケーションソフトは、すべて終了してください。
- ②PC の CD-ROM ドライブに「PASESAⅢ データ管理ソフト CD」をセットします。
- ③CD-ROM の中にあるフォルダ「PASESA3(Bundle64bit)」をダブルクリックします。




- ④「setup.exe」をダブルクリックします。




- ⑤「次へ(N)」をクリックします。

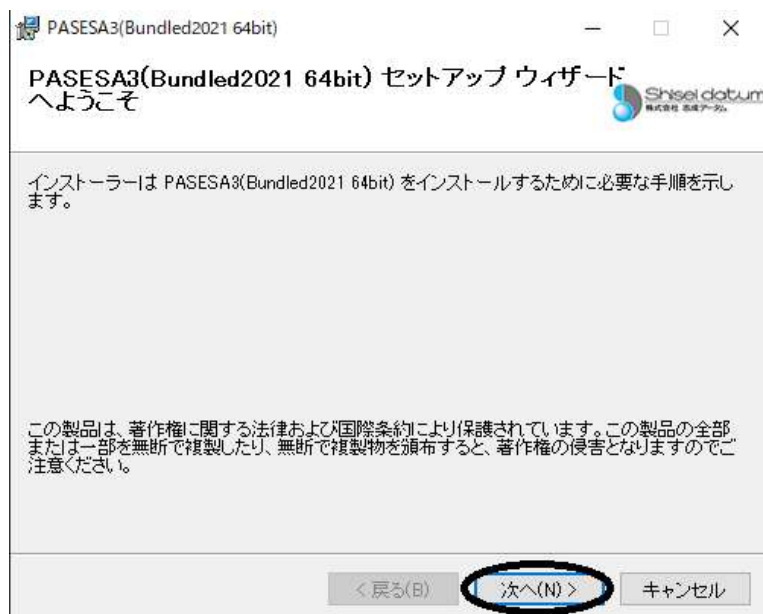


⑥「次へ(N)」をクリックします。

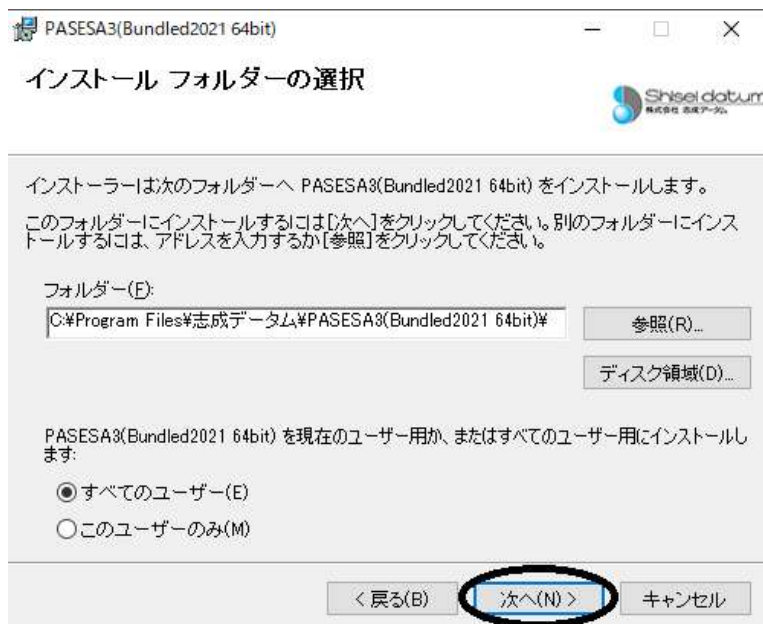


⑦「次へ(N)」をクリックします。

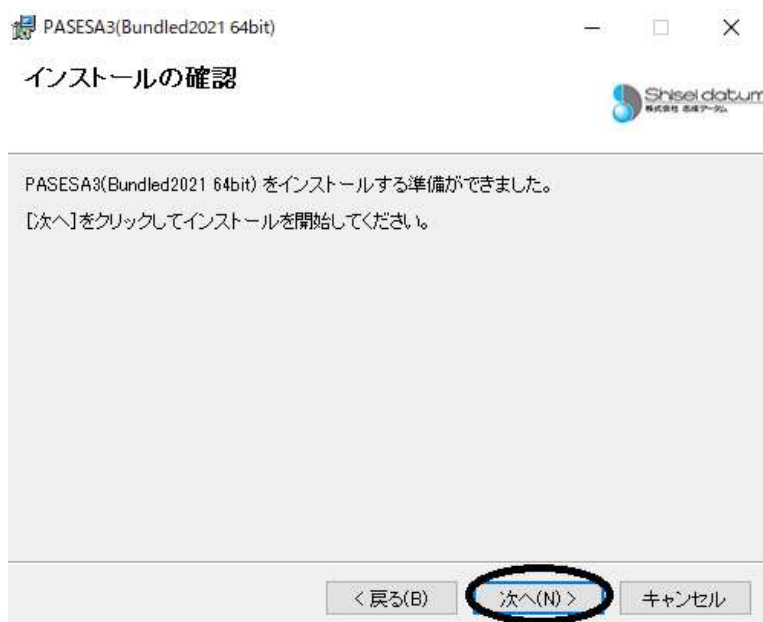

⑧「はい」をクリックします。

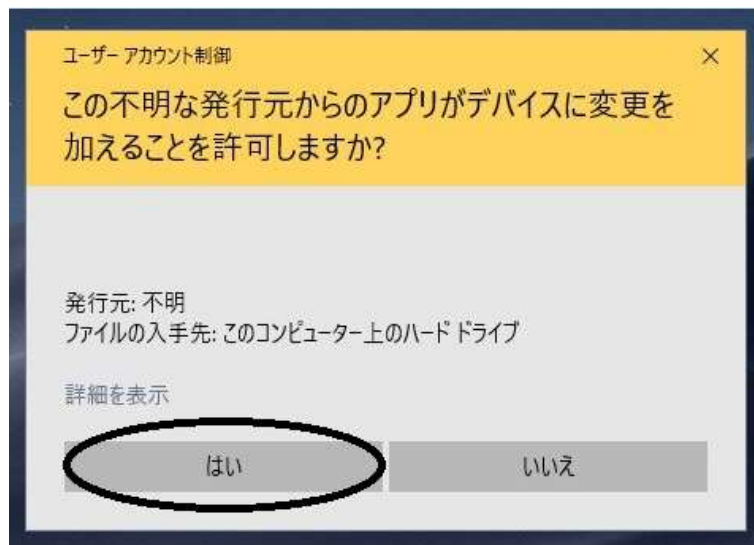

⑨「閉じる(C)」をクリックします。

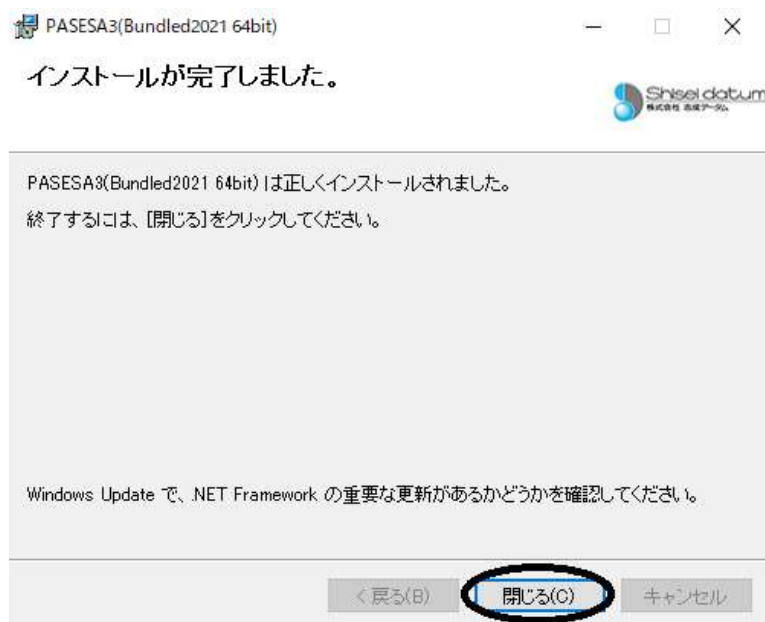


⑩PASESAⅢ データ管理ソフトのインストール完了です。取扱説明書に従いご利用ください。

3.ソフトウェアのアンインストール(Windows 10 64bit)


- ①起動しているアプリケーションソフトは、すべて終了してください。
- ②Windows スタートメニューの上で右クリックします。



- ③アプリと機能(F)をクリックします。

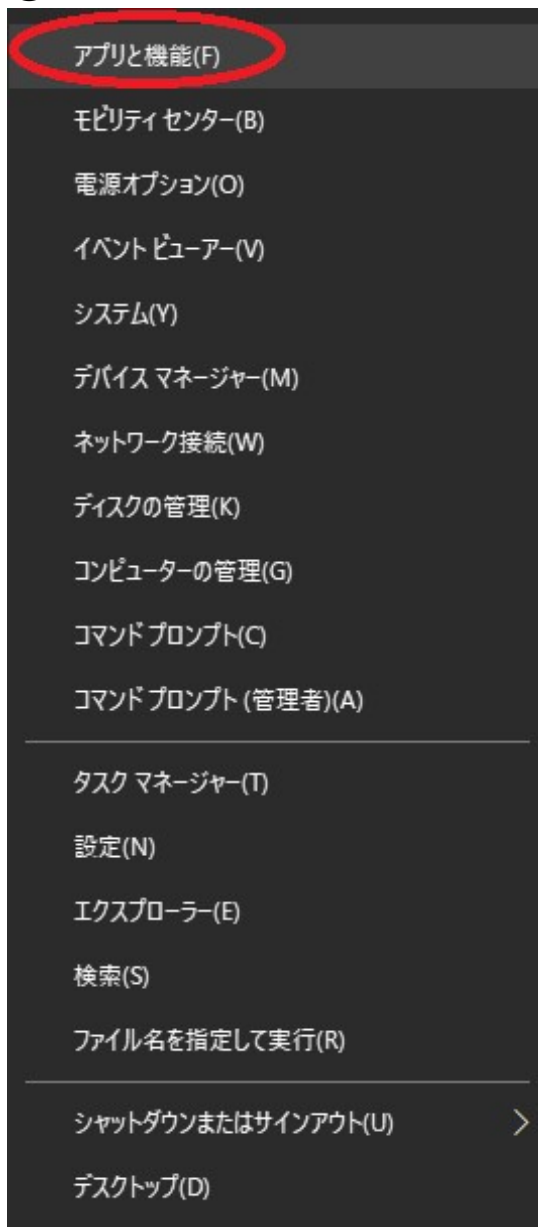


④アプリ一覧から PASESA3(Bundled2021 64bit)を探し「アンインストール」をクリックします。

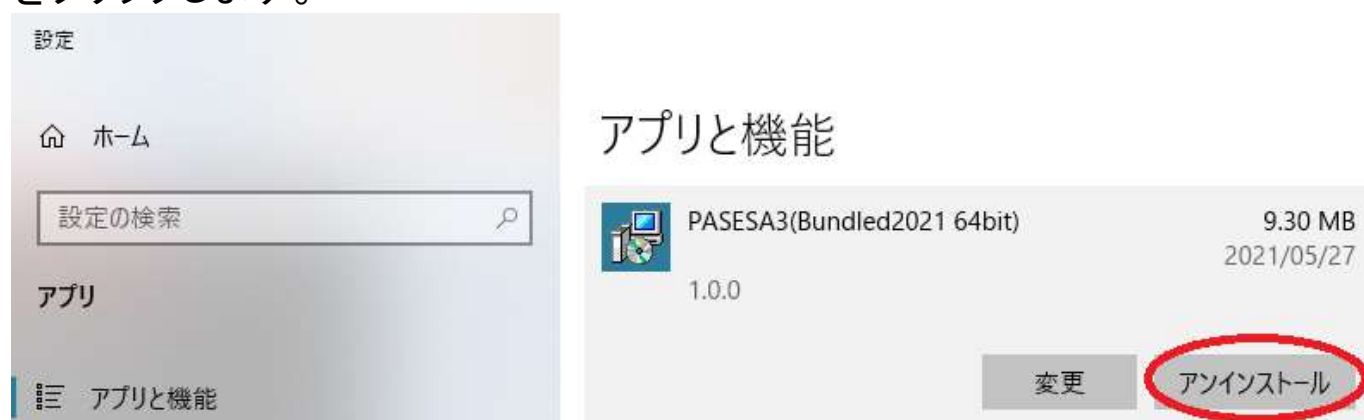

⑤「アンインストール」をクリックします。



⑥「はい」をクリックします。

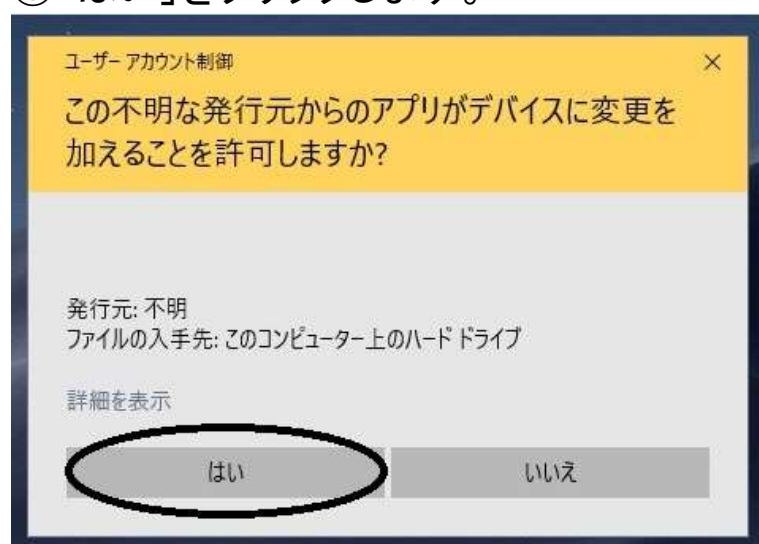

⑦PASESAⅢデータ管理ソフトのアンインストール完了です。

4.ソフトウェアのインストール(Windows 10 32bit)

- ①起動しているアプリケーションソフトは、すべて終了してください。
- ②PC の CD-ROMドライブに「PASESAⅢ データ管理ソフト CD」をセットします。
- ③CD-ROM の中にあるフォルダ「PASESA3(Bundled32bit)」をダブルクリックします。




- ④「setup.exe」をダブルクリックします。




- ⑤「次へ(N)」をクリックします。




- ⑥「次へ(N)」をクリックします。

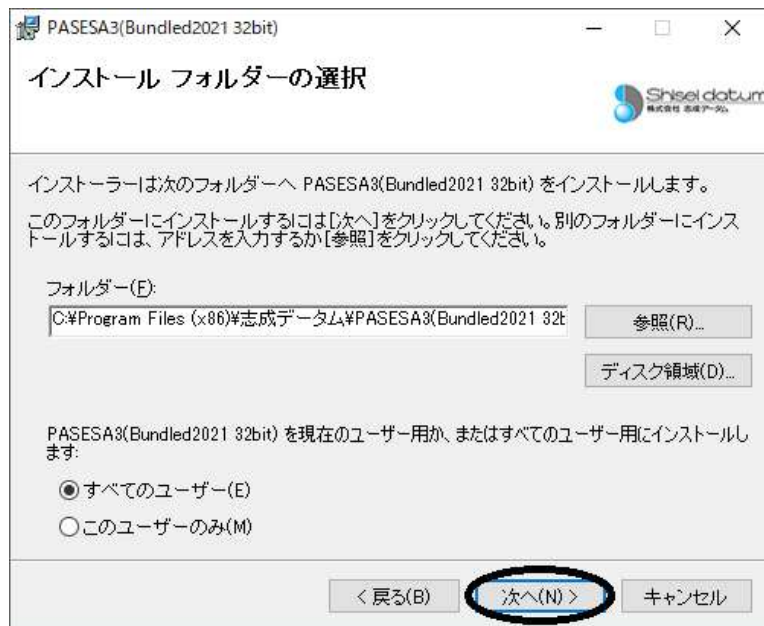


⑦「次へ(N)」をクリックします。

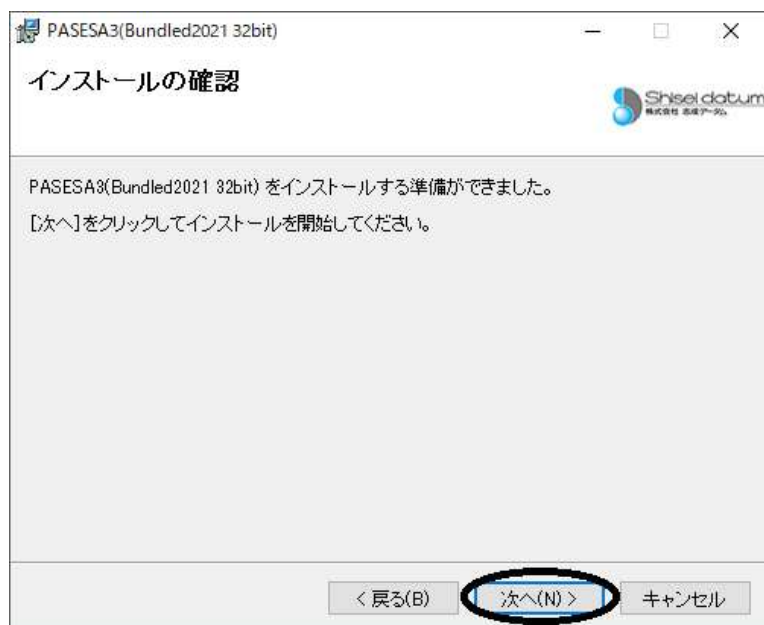

⑧「はい」をクリックします。

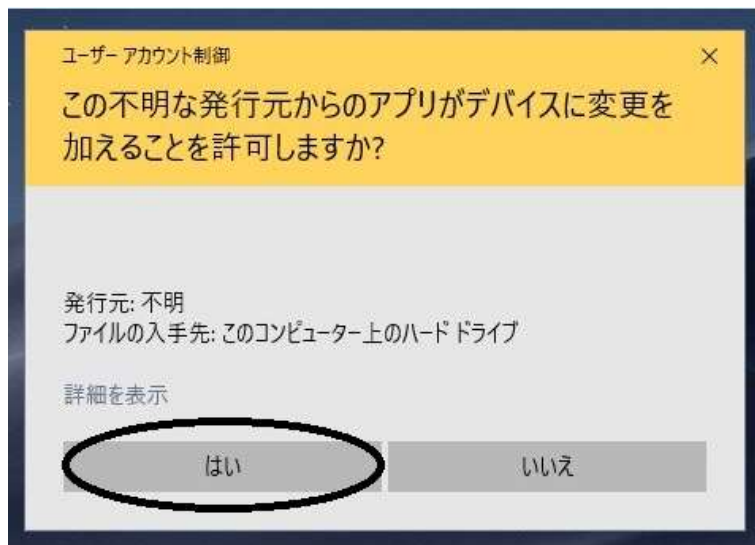

⑨「閉じる(C)」をクリックします。

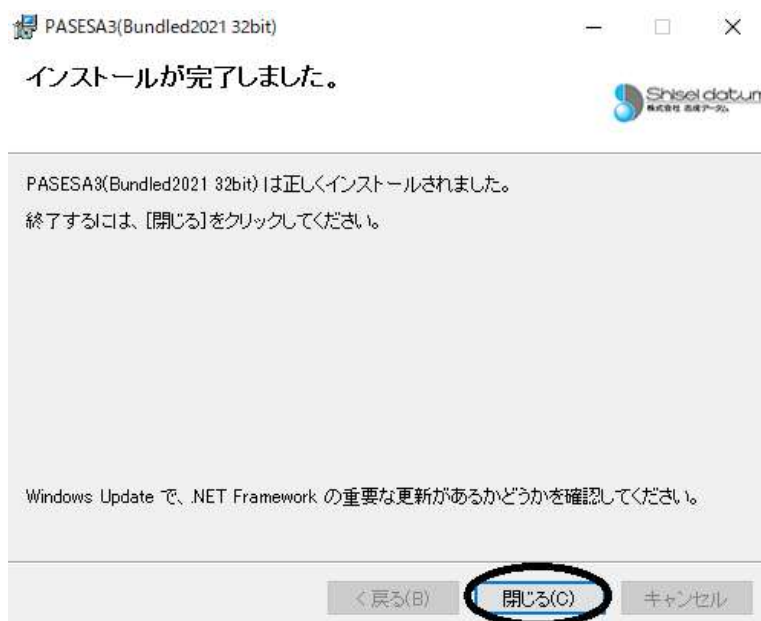

⑩PASESAⅢ データ管理ソフトのインストール完了です。取扱説明書に従いご利用ください。

5.ソフトウェアのアンインストール(Windows 10 32bit)

- ①起動しているアプリケーションソフトは、すべて終了してください。
- ②Windows スタートメニューの上で右クリックします。



- ③アプリと機能(F)をクリックします。




④アプリ一覧から PASESA3(Bundled2021 32bit)を探し「アンインストール」をクリックします。



⑤「アンインストール」をクリックします。



⑥「はい」をクリックします。

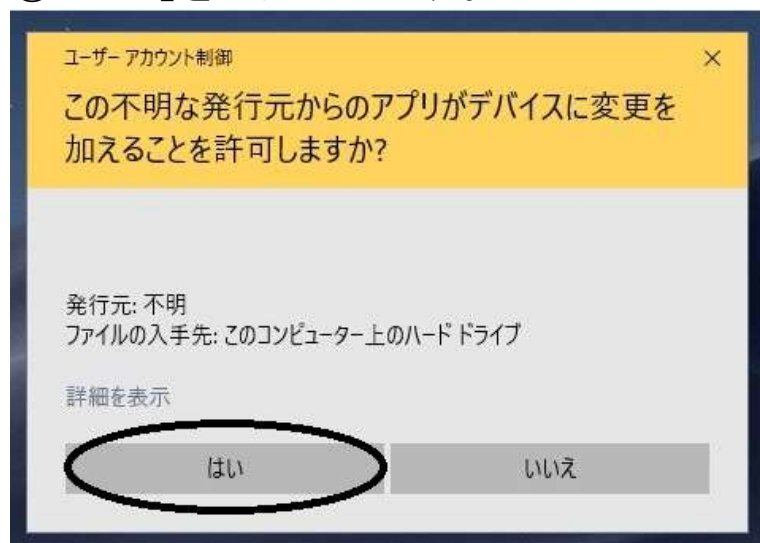

⑦PASESAⅢデータ管理ソフトのアンインストール完了です。

6.データの完全な削除に関して

PASESAⅢ 管理ソフトはアンインストール時にデータの消去を実施しません。データの完全な削除が必要な場合以下の手順を実行ください。


- ① 起動しているアプリケーションソフトは、すべて終了してください。
- ② Windows スタートメニューの上で右クリックします。



- ③ エクスプローラ(E)をクリックします。




④ Cドライブの「PASESA3」フォルダで右クリックします。

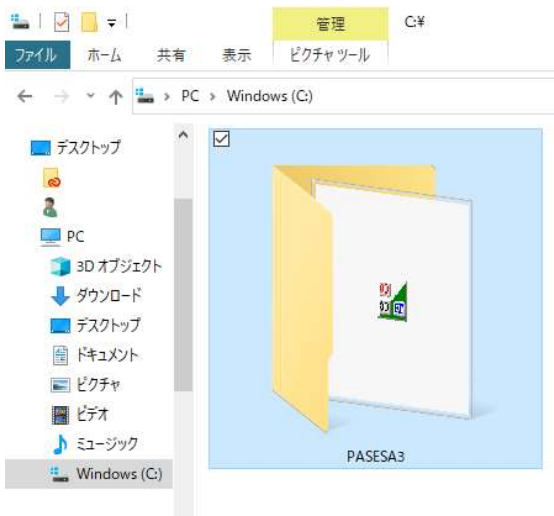

⑤ 「削除(D)」をクリックします。

⑥ ごみ箱を右クリックします。

⑦ ごみ箱を空にする(B)をクリックします。

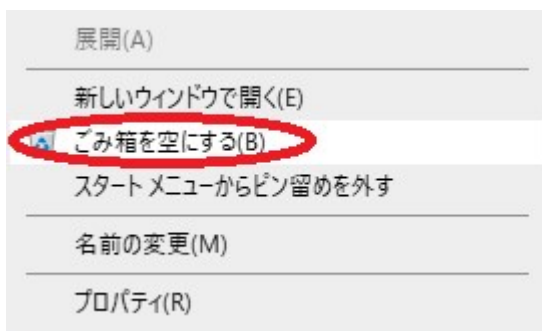

⑧ 「はい(Y)」をクリックします。

⑨ PASESA3 データ管理ソフト データの完全削除完了です。



7.問い合わせに関して

□本製品に関するご質問・ご相談窓口

・会社名:株式会社 志成データム

・住 所:〒194-0215

東京都町田市小山ヶ丘二丁目 2 番地 5

まちだテクノパーク内センタービル 4F

・TEL:042-798-4711(代表) FAX:042-798-4714

・カスタマーサポート 0120-266730

・受付時間:月～金曜日(祝祭日、弊社休業日を除く)9:30～17:00

・URL:<http://www.shisei-d.co.jp/> E-MAIL:info@shisei-d.co.jp

<メモ>